



Het aanbrengen

IMPRINT[®]SPORT

- 1**
 - Kies een Imprint Sport shoe passend bij de hoefatmetingen.
 - Plaats de Imprint Sport shoe met de bodemvlakte omhoog in een bak, bovenop debijbehorende steun om te voorkomen dat het beslag aan de bodem van de bak vastplakt.
 - Voeg voor later gebruik een kleine hoeveelheid Imprint Hoof Repair toe aan het water (zie punt 4).
 - Giet kokend water (100°C) in de bak totdat de kraag van de Imprint Sport Shoe net onderwater staat. Let erop dat het zooloppervlak niet te zacht wordt en vervormt; dit doet afbreuk aan de stabiliteit van het beslag.
 - Het beslag moet net zo lang worden verwarmd (ca. 2 min) tot de kraag en een gummiachtige consistentie heeft gekregen.
- 2**
 - Bereid de hoof voor door de draagrand rond de toon naar achteren af te ronden - in de richting van de witte lijn - om ruimte te creëren voor de kraag van de Imprint Sport shoe. Rasp het onderste gedeelte van de wand van verzen tot verzen en verwijder de glazuurlaag en al het losse hoorn van het gedeelte waar de kraag moet komen.
 - Spuit Surgical Spirit op de onderkant van de hoof.
 - Met een 4 mm dremel freest u aan elke kant van de hoof - gelijkmatig verspreid - drie ovale inkepingen van 10 x 8 mm tot een veilige diepte. Let erop dat ze in het gedeelte liggen waar de kraag zal komen; ze dienen als verankeringspunten en zijn van groot belang voor de stabiliteit van het beslag.
- 3**
 - Trek nu latex handschoenen aan om uw handen te beschermen.
 - Terwijl het beslag opwarmt, brengt u rondom de buitenkant van de hoof (van verzen tot verzen) tot aan de hoogte van de kraag een dun laagje Imprint structuurlijm aan. Ook aan de binnenzijde van de steunsels moet wat lijm worden aangebracht.
 - De hoof mag nu op de grond gezet worden.
- 4**
 - Pak het zachte Imprint Hoof Repairmateriaal uit het hete water en maak een laagje rondom de hielen en steunsels. Let op dat de lijm op de hoofwand niet wordt aangeraakt.
- 5**
 - Pak het beslag vast bij de straalbalk en til het snel maar voorzichtig uit het hete water.
 - Trek de steun van het beslag af. Zorg ervoor dat de kraag hierbij niet verbuigt (naar binnen).
 - Leg het beslag op de hoof, met het teengedeelte in lijn met de hoofwand (niet ervoor), het verzengedeelte parallel met de hoof, de straalbalk in contact met de straal en met voldoende vrije ruimte voor de zool.
 - Leg beide handen om zowel de hoof als het beslag heen, leg de vingers over de kraag van het beslag en druk deze voorzichtig aan zodat er een gelijkmatige en glad aansluitende verbinding tussen de hoofwand en de kraag ontstaat. Trek de kraag niet omhoog langs de hoofwand want dit doet afbreuk aan de stevigheid van de verbinding. Trek de kraag niet omhoog langs de hoofwand want dit doet afbreuk aan de stevigheid van de verbinding.
 - Controleer het contact met de straal en kneed het plastic indien nodig nog eens in de juiste vorm.
- 6**
 - Als u tevreden bent met de positie en de pasvorm kan het beslag bevestigd worden.
 - Spuit alle oppervlakken van het beslag in met Imprint Shoe Freezer maar zorg ervoor dat er niets op de gevoelige delen van hoof terecht komt.
 - Let erop dat het beslag volledig hard is voordat u het paard op zijn hoof laat steunen.
- 7**
 - Controleer of de verbinding tussen de kraag en de hoofwand intact is, d.w.z. dat er nergens ruimte aanwezig is tussen kraag en hoofwand en dat er geen beweging in de verbinding zit.
 - Breng een dunne laag Imprint structuurlijm aan rond de bovenkant van de kraag en strijk deze glad met uw vingers om een goede dichting te krijgen.
- 7a**
 - Laat het paard minstens tien minuten rustig staan totdat de lijm hard geworden is.
 - Het beslag is klaar.

HET VERWIJDEREN VAN DE IMPRINT SPORT SHOE

- De kraag wordt tot aan de hoofwand weg geraspt en van de verzenen afgehaald met de hoefkniptang.
- Een andere mogelijkheid is de hoefkniptang te gebruiken om de kraag sneller van de wand af te halen. Om schade aan de hoofwand te vermijden, moet u ervoor zorgen dat het beslag helemaal los zit voordat u het van de hoof aftrekt.

Om schade aan de hoofwand te vermijden, moet u ervoor zorgen dat het beslag helemaal los zit voordat u het van de hoof aftrekt.

NUTTIGE TIPS

- Controleer of de kraag goed tegen de hoofwand aanligt en stevig vastzit. • Indien nodig kan het beslag achteraf nog aangepast worden met behulp van een heteluchtpistool. • Bij asymmetrische of erg beschadigde hoeven waar op sommige plekken hoorn ontbreekt of extra versterking nodig is, kan men extra lijm met verwarmde Imprint Hoof Repairmateriaal aanbrengen voordat het beslag op de hoof wordt bevestigd. • Om het beslag bij de zijwanden of de verzenen te verhogen, brengt u verwarmde Imprint Granules in vorm en drukt u ze op het verwarmde hoefoppervlak en op de kraag van de Imprint Sport shoe om het gewenste effect te bereiken. • Om meer grip te krijgen op ijzige bodems brengt u wolfram stiften aan in het achterste gedeelte van het beslag. • Imprint Sport raadt aan om hexagonale kalkoenen te gebruiken. Als men de voorkeur geeft aan vierkante kalkoenen (11 mm), moet er een onderlegplaatje van 14 mm tussen het beslag en de kalkoenen worden aangebracht.

Imprint Equine Foot Care Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK.
Adviceline: +44 (0)1666 822953 Email: info@imprintsport.com Website: www.imprintsport.com



www.facebook.com/ImprintEquineFootCare