



Att applicera

IMPRINT[®]SPORT

- 1**
 - Välj rätt storlek på Imprint Sport så den passer hoven
 - Imprint Sport-skon placeras med marksidan uppåt i en behållare på stödet. Undvik kontakt med behållarens botten så att den inte fastnar.
 - Lägg till lite grand av Imprint Hoof Repair i vattnet för senare användning (se 4)
 - Kokande vatten (100° C) hålls i behållaren upp till Imprint-skons kant. Om man mjukar upp och manipulerar skons skoyta kan skon försvagas.
 - Skon värms upp tills kanten är formbar, ungefär i 2 minuter.
- 2**
 - Hoven förbereds genom att man fasar hovens kant runt tån, bak mot lamellranden, för att göra plats för Imprint Sport-skons kant. Hovens nedre del raspas och mjukt horn avlägsnas från trakt till trakt och upp för kanten.
 - Rengör endast hovens underside med tvättsprit
 - 3 jämnt fördelade ovala skårer görs, 10x8 mm, till ett säkert djup, med hjälp av en speedborr på var sida av hoven. Se till att de hamnar inom skons kant. Skårorna fungerar som nyckelpunkter och behövs för att hålla skon på plats.
- 3**
 - Använd latexhandskar för att skydda händerna.
 - Medan skon fortfarande värms upp appliceras ett tunt lager Imprint Structural Adhesive på den yttre nedre hovväggen från trakt till trakt och upp så långt kanten går. Se till att limmet appliceras in i strålfårorna upp till skons höjd
 - Hoven kan nu sättas ner på marken.
- 4**
 - Ta det uppmjukade Imprint Hoof Repair ur det varma vattnet och forma ett tunt Skikt runt ballarna och in i strålfårorna. Var försiktig och rör inte limmet på hovväggen
- 5**
 - Skon tas snabbt och försiktigt ur det varma vattnet genom att man håller i strålplattan.
 - Skostödet tas bort från skon, men försiktigt så att inte kanten deformeras.
 - Skon placeras mitt på hoven, med skons tå i linje med hovväggen, inte framför. Trakterna ska vara parallella med hoven, strålen ska ha kontakt och hovens undersida ska ha fritt utrymme.
 - Hoven och skon kupas i händerna och fingrarna trycks lätt över skokanten. Se till att det blir ett jämnt och förenat fäste mellan hovväggen och skokanten. Alla skårer ska kontrolleras så att de är fyllda med plast från skokanten
 - Imprint Sport-skons kant får inte sträckas upp längs hovväggen eftersom det påverkar skons fäste.
 - Platen trycks lätt in i skårorna med fingrarna samtidigt som man fortsätter att släta ut skons kant.
 - Alla skårer ska kontrolleras så att de är fyllda med plast från skokanten och inte bara fästningsmaterial.
- 6**
 - När man är nöjd med hur skon ligger och är passad kan den fästas.
 - Skons alla ytor sprayas med Imprint Shoe Freezer, men se till att inte spraya några känsliga delar av hoven.
 - Kontrollera att skon är hård innan hästen får stödja på den.
- 7**
 - Kontrollera att fästet mellan skons kant och hovväggen är helt och inte innehåller några håligheter eller rör sig.
 - En tunn droppe Imprint Structural Adhesive dras längs den övre delen av skons kant och slätas ut med fingret för att garantera förseglingen.
- 7a**
 - Låt hästen stå i minst 10 minuter eller tills fästningsmaterialet har stelnat.
 - Nu är skon på.

ATT TA AV IMPRINT SPORT-SKON

- Kanten raspas ner till hornet och skalas av från trakterna med hjälp av verktyg.
 - Alternativt kan verktyg användas försiktigt för att ta bort kanten snabbare. Se till att skon har lossnat helt innan den dras av för att inte skada hoven.
- Se till att skon har lossnat helt innan den dras av för att inte skada hoven.**

ANVÄNDBARA TIPS

- Se till att kanten har formats och fästs väl till hovväggen.
- Förändringar och modifieringar av skon kan göras med med en liten låga fackla.
- När skon fästs till asymmetriska eller skadade hovar, eller om hornet är bristfälligt eller om det behövs extra styrka i ett visst område kan extra fästningsmaterial och uppvärmd Imprint Granules läggas till innan Imprint Sport-skon fästs.
- För att gradera eller lyfta skon kan uppvärmd Imprint Granules formas och gjutas fast till den uppvärmda hoytan och kanten av Imprint Sport-skon för att få önskad effekt.
- För att få extra bra grepp på isiga underlag kan tungstenbroddar användas i skons båda trakter.
- Imprint Sport rekommenderar hexagonala broddar. Men om fyrkantiga broddar föredras (11 mm) måste en 14 mm packning placeras mellan skon och brodden.

Imprint Equine Foot Care Town Forge, High Street, Malmesbury, Wiltshire, SN16 9AT, UK.
 Adviceline: +44 (0)1666 822953 Email: info@imprintsport.com Website: www.imprintsport.com



www.facebook.com/ImprintEquineFootCare